

MONTAJE

1º PASO: Montaje del recipiente interno



Coloque la tapa autoalineante en el recipiente, sin apretarla demasiado. El adhesivo de la tapa tiene que cubrir toda la circunferencia del recipiente.

2º PASO: Preparación de la tapa



1. Cierre las cápsulas de las tomas tándem y de vertido
2. Conecte el tubo azul en la toma aspiradora
3. Coloque el tubo de succión en la toma del paciente (codo opcional)

Válvula de Vacío: On/Off



3º PASO: Colocación del recipiente interno dentro del externo



1. Coloque el recipiente externo en el estribo correspondiente, luego introduzca el recipiente interno.
2. Por último conecte el tubo azul de aspiración a la toma aspiradora de la tapa del recipiente.